



Reumatikerkrycka

Kryckan är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Vår RA-krycka är för personer med betydande rörelsehinder med behovet av partiell eller fullständig utsläpp till en eller båda benen eller kroppssektion efter olyckor, operation eller sjukdom associerad med sjukdomsrelaterad oförmåga att använda andra hjälpmedel.

Hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material.



Benämning	Reumatikerkrycka
Sanicare art nr	10
Längd, cm	95-118
Tjocklek rör, över/under, mm Ø	23/20
Vikt per produkt, kg	0,66
Max brukarvikt / produkt, kg	140
Färg rör	Ofärgat
Diameter doppsko, mm	19
Art nr doppsko, reservdel	719 + färgkod
Material, plastdelar	Polyamid (PA16)
Material, rör	Aluminium
Regelbunden rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
Rengöring mellan brukare	Kan autoklaveras 85°C max 3 min. Eller desinfektionsmedel Incidin Liquid (reflexen ska ej torkas)
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg

Kryckan bör kasseras 3 år efter tillverkning (datum se etikett på rör). Kryckan skall även tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, utsliten eller glappar i höjjusteringen vilket kan medföra risk vid användning



Reg.-Nr.: MQ 0115318



Krycka Reumatikerkrycka 10

OBS! Läs anvisningarna noga innan kryckan tas i bruk!

Avser 2012 års modell eller senare

Hur individanpassas kryckan?

RA kryckan är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Hur man använder kryckor kan skilja sig från fall till fall och beror på individuella begränsningar vad det gäller gångförmågan, i början är det viktigt att kvalificerad personal ger dig råd och instruktioner om hur kryckan ska användas.

Hur kryckan används är beroende på individuella behov och gångförmåga, utprovning/justering skall ske i samråd med kunnig personal som har kunskap om produkten och dess funktion i olika situationer för bästa möjliga resultat.

För rätt användning av kryckan skall längd samt vinkel på handtagjusteras. Justeringen skall ske av kvalificerad personal. Felaktigt justerad krycka kan begränsa den funktionella förmågan. Kryckan kan bara ge önskad hjälp om de anpassas optimalt efter dig. Om du är osäker ta kontakt med specialist.

Justering av höjd: Tryck in knappen som fixerar de båda rören, dra därefter isär eller skjut ihop rören till önskad längd. Lås sedan rören genom att matcha de två bulthålen och se till att tryckknappen snäpper på plats igen.

OBS! Kontrollera alltid att rören är fixerade genom att försöka rotera eller flytta rören!


Justering av Underarmsdel: Reglera handtaget genom att släppa på de två skruvar som sitter under armstödet. (Använd en insexnyckel nr 4)

- Armlängd: Reglera armstödet så att det blir önskad längd mellan stödet och handtaget
- Justera till rätt vinkel: Vinkla till höger eller vänster. Därefter skruvas åter skruvarna under armstödet fast.
- Justering av handtags vinkel: Lossa skruven på handtaget och anpassa till korrekt vinkel. Skruva därefter åt skruven.

OBS! det är viktigt att få justeringarna så optimala som möjligt.

OBS! Var noga med att alla skruvar är ordentligt åtskruvade efter justering annars kan det medföra en ökad risk för olycka om kryckans handtag viker sig eller att rören går ihop om de inte är korrekt fixerade.

För att fixera armen i armstödet: Placera underarmen på stödet, vik över banden och fäst bandet på den motsatta sidans karborre del. Placera bandet med endast ett lätt tryck mot handen.

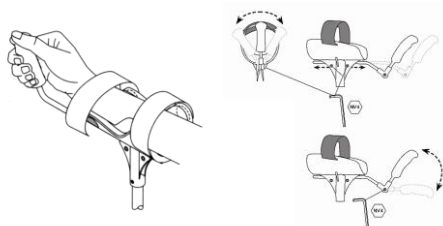

Bruksanvisning

- Använd alltid stödet på motsatt sida av den skadade eller svaga.
- Håll kryckan nära kroppen och luta den inte utåt,
- Placera kryckan så rakt mot marken som möjligt. så att den inte glider iväg
- När du går skall kryckan placeras så upprätt som möjligt på marken.
- Sätt inte kryckan för långt bort från kroppen. Du riskerar då att ramla.
- När du sitter bör du använda stolar med armstöd så att när du ställer dig upp kan du använda armstödet som stöd.
- Om möjligt bör kvalificerad personal visa dig hur man går uppför trappor med kryckor
- När du går i en trappa med en krycka bör du hålla ledstången med den lediga handen.
- När du går i en trappa med två kryckor, ta kryckorna i en hand och använd ledstången som stöd.
- Håll kryckan i ett stadigt och omslutande grepp i handtaget.

Fortsättning på nästa sida




Forts. bruksanvisning

- Välj en sko med låg och stadig klack så att benet klarar den extra vikten bättre.
- Användning av kryckor kan ge tryck i händerna eller belastning på armar och axlar, var därför noga med att vila ofta.
- Tryckmärken eller skavsår kan uppstå på händer armar eller kläder och som förebyggande åtgärd rekommenderar vi att man använder polstring på handtag samt vaddering av armbygel.
- Ta om möjligt hjälp av en medföljande person som du kan luta dig mot och som kan ta emot dig om du ramlar.
- Om du ändå ramlar. Låt om möjligt kryckorna falla från kroppen så att du inte faller på dem!

Varning!

Trappor utan ledstång utgör en ökad risk för fall och stor försiktighet bör iakttagas när du går i en sådan trappa!

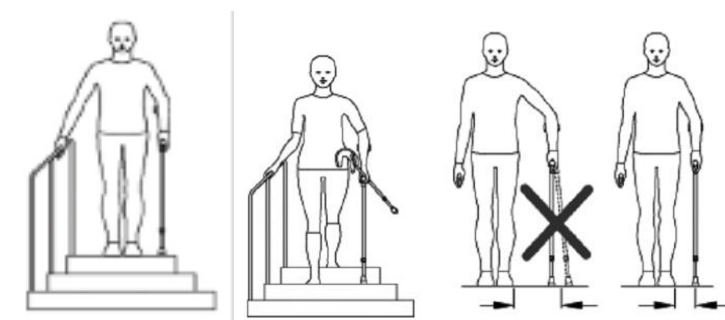

Säkerhetsföreskrift

Produkten skall enbart användas till avsedd användning och föreskrifter enligt nedan skall följas!

- Utprovning/justering skall ske i samråd med personal som har kunskap om produkten och dess funktion. Felaktigt justerad krycka begränsar användningsområdet samt kan leda till en ökad felbelastning och i värsta fall en säkerhetsrisk!
- Max brukarvikt får ej överskridas.
- Kryckan skall användas i original utförande för att garanti skall gälla samt original-Reservdelar/tillbehör.
- Handtaget får ej belastas med kassar el dyl.
- Kryckan får ej användas att lyfta med, trycka på knappar osv
- Regelbunden kontroll av kryckan om det finns yttre skador rådgör med en specialist. Sneda eller skadade kryckor får ej användas då de har en sämre stabilitet.

Kryckan skall under dessa omständigheter ej lagas utan bytas ut!

- Regelbunden kontroll av doppskon, defekt skall bytas ut mot original tillbehör, Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.
- OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våt men även fuktiga underlag, löv, grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka!
- Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom kryckan kan glida iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning!
- Löst liggande mattor eller dyl. kan glida iväg och orsaka olyckor!
- Vid justering av höjden är det viktigt att tryckknappen är fixerad i de båda rörens hål och att tryckknappen är helt ute efter justering.
- Alla skruvfästen måste dras åt ordentligt innan användning.
- Undvik snö eller is om din krycka inte är utrustad med doppskor för vinterbruk.
- Vid vinterväglag finns separat isbrodd art nt 1719 (en pigg) och 1718 (hel krona) som tillbehör.

Fortsättning på nästa sida.

Forts. Säkerhetsföreskrift

Vår original-doppsko är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet. Den har också ett skålat stålslag för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av kryckan

OBS!! Då du behöver använda kryckor eftersom din vanliga rörlighet är nedsatt. Även om kryckorna hjälper dig i den här situationen bör du alltid tänka på att din grundläggande rörlighet fortfarande är nedsatt. Var alltid medveten om detta och var alltid försiktig när du använder kryckor.

Förvaring/Rekonditionering

- Förvara aldrig kryckan i närheten av värme t.ex. ugn, element eller i bilens bakruta.
- Undvik att lägga kryckan ute i solen längre stunder då plasten påverkas negativt.
- Undvik att tappa kryckan.
- Kontrollera regelbundet doppskons kvalitet för att öka användarsäkerheten.
- Under rätt förhållande kan kryckan förvaras upp till 2 år, kontrollera alltid kryckan innan den åter tas i bruk.
- Regelbunden rengöring av kryckan med ett mildt medel samt mjuk trasa. Rengöring mellan brukare rekommenderas i autoklav 85° max 3 minuter eller desinfektionsmedel Incidin Liquid.
- **Handtag samt doppsko får inte rengöras med oljiga ämnen pga halkrisk!**
- Regelbunden kontroll av kryckan skall göras och skadad eller trasig krycka skall kasseras.

Garanti

Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och ändamål samt att leverantörens originaldelar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.

Tillbehör

Benämning	Isbrodd	
Utförande	Krona	En pigg
Sanicare art nr	1718	1719
Diameter på rör i mm	17-23	
Material	Metall	
Rengöring	Mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa	



1718

1719