




MerryGrip griptång

MerryGrip är en griptång tillverkad i aluminium och plast vilket resulterar i en låg vikt. Passar i alla vardagliga moment allt från trädgårdsarbete till en hjälpsande hand i köket. Den finns i anpassade längder för olika ändamål och är utrustad med grip gummi i klon för ökad friktion. MerryGrip har även en magnet placerad på änden av handtaget för att kunna plocka upp en nyckel eller andra lättare metallföremål.

I handtaget sitter det ett snöre för upphängning samt på undersidan av den rörliga delen av handtaget finns ett gummi för att man lätt ska kunna hänga den på en plan yta.



| | | | | |
|---------------------------------|--|--------|--------|--------|
| Benämning | MerryGrip | | | |
| Varumärke | MerryCare | | | |
| Sanicare art nr | 144108 | 144110 | 144111 | 144112 |
| Längd, cm | 40 | 60 | 70 | 80 |
| Färgkod | Grå | Grön | Röd | Blå |
| Vikt per produkt, kg | 120 | 160 | 180 | 200 |
| Material, handtag | Polyamid (PA16) | | | |
| Material, rör | Aluminium | | | |
| Tjocklek rör, mm Ø | 5 | | | |
| Regelbunden rengöring | Milt rengöringsmedel och mjuk trasa | | | |
| Rengöring mellan brukare | OBS! griptången tål inte varmvatten/ånga över 65°C. Rengör med ljummet vatten eller citronsyra alt desinfektionsmedel med >40% isopropylalkohol(ej gripgummit) | | | |
| Kasseras | Sorteras efter lokal anvisning | | | |
| Förvaring | Rumstemperatur | | | |
| Övriga information | Produkt innehåller inte PVC | | | |

 **Produkten skall inte förflytta heta eller farliga vätskor då det finns risk att användaren skadas om det släpper från klorna.**

CE
Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav


Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



sanicare



Bruksanvisning

MerryGrip griptång är ett hjälpmedel för personer som har svårt att greppa eller nå olika föremål.

Aktiv modell är för personer som klarar av att trycka ihop handtaget och hålla handtaget intryckt under hela momentet.

Genom att trycka ihop handtaget pressas de båda klorna i griptångens ände ihop för att kunna greppa om föremålet.

Passiv modell är för personer som har svårt att själv hålla handtaget intryckt under hela momentet. Genom att trycka ihop handtaget öppnas klorna i griptångens ände för att kunna greppa. När handtaget släpps greppar griptången automatiskt om föremålet.

Grip gummit som sitter på de båda klorna gör att det är enkelt att fixera och flytta föremålet.

När momentet är utfört släpper man handtaget och föremålet släpper från klorna.

När man inte längre behöver använda griptången så använd snöret som sitter i handtaget för att tex hänga på en krok eller över en stolskant alt på rollatorn eller rullstolen för att ta den med sig. Det finns också under handtaget en kant som är utrustad med gummi som gör att du kan hänga ifrån dig griptången på en bordskant.

På baksidan är griptången utrustad med en magnet för att kunna hjälpa till att få upp metallföremål så som nycklar och gem från golvet.

- MerryGrip är avsedd och skall endast användas som hjälpmedel att förflytta, räcka eller att greppa lättare saker med och andra användningsområden rekommenderas ej
- MerryGrip används med fördel till enklare och lättare trädgårdsarbete som tex plocka ogräs, löv eller som planteringshjälp.
- Merrygrip underlättar i trånga utrymmen där det är svårt att komma till med andra greppverktyg eller händer, både vad det gäller utrymme och djup.
- MerryGrip är en ovärderlig hjälp till att ta upp tidning, papper eller kuvert som har ramlat på golvet.
- MerryGrip fungerar som en förlängd arm i köksarbetet som tex att ta ned ingredienser eller andra föremål.



MerryGrip går att använda i din trädgård.




MerryGrip kan användas om du ska fixa din bil.



MerryGrip kan användas om du tappat t ex en tidning på golvet.



MerryGrip kan användas för att nå olika föremål i köket.

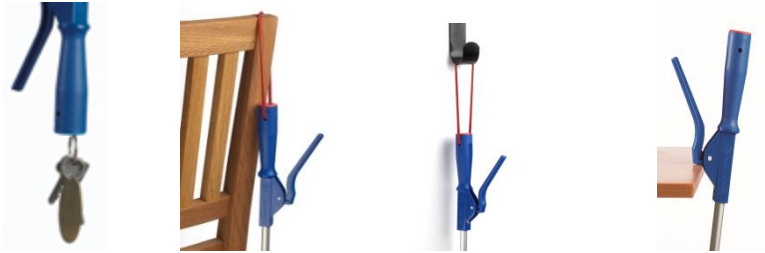

Säkerhetsföreskrifter

- Produkten skall användas för avsett ändamål
- Produkten skall inte användas för att bryta eller skruva med
- Produkten är inte till för att förflytta tunga föremål då det finns risk för skada på brukaren om föremålet släpper från klorna.
- Produkten skall inte förflytta heta eller farliga vätskor då det finns risk att brukaren skadas om det släpper från klorna.
- Produkten skall regelbundet kontrolleras och en defekt produkt skall kasseras.
- Regelbunden kontroll av gripgummi. Ett söndrigt eller att det saknas gripgummi påverkar effekten av produkten och kan resultera i att funktionen inte fungerar eller att föremålen glider ur klorna.

Reservdel

MerryGrip Gripgummi art nr 144122 (säljs i styck)

Rekonditionering

Griptången rengörs med ljummet vatten och diskmedel eller citronsyra, alternativt desinfektionsmedel med >40% isopropylalkohol (ej gripgummit)

OBS! Griptången tål inte varmvatten/ånga över 65°C.

Garanti

Garantin är 1 år.