



Isdubbar – tillbehör till kryckor och käppar

Bruksanvisning för montering av isdubb

Innan användning kontrollera att låsmekanismen fungerar

- Skruva ut de två skruvarna på var sin sida (Bild 1)
- Placera isbrodden på röret och kronan ner mot doppskon.
- Se till att kronan sluter tätt mot doppsko
- Skruva därefter i skruvarna så att de kommer på framsidan av kryckan/käppen (i gångriktning). Om diameter är större använd de längre medskickade skruvarna.
- När isbrodden inte skall användas, tryck då in de båda vita plastdetaljerna på var sin sida (bild 2).
- Därefter kan man enkelt fälla upp isbrodden om man inte längre har behov av den.
- Samma enkla tillväga gångsätt gäller när man fäller ner isbrodden



Benämning	Isbrodd	
Utförande	Krona	En pigg
Sanicare art nr	1718	1719
Diameter på rör i mm	17-23	
Material	Metall	
Rengöring	Milt rengöringsmedel och en mjuk trasa	



1718



1719



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



Reg.-Nr.: MQ 0115318