



Armbågskrycka klassiker Junior art nr 241

Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Hög maxbelastning, enkel justering av höjd, mycket hög kvalitet på ingående material, reflex både bak och fram för ökad säkerhet. Mellan rören sitter en låsring som säkerställer en klickfri gång. Materialet i underarmsstödet består av 15 % glasfiber som gör plastdelen mer flexibel vid temperaturväxlingar samt minskar obehagligt tryck om individen har bredare underarmar eller tjockare kläder som t ex vinterjacka. Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp



| | | |
|---------------------------------|---|---------|
| Sanicare art nr | 241 | 241 |
| Handtag: Standard, rakt, hårt | | DVKbl |
| Handtag: Standard, rakt, mjukt | DSKbl | |
| Längd i cm | 57-75 | 45-63 |
| Justerbar underarmsdel, cm | 19-24 | 19-24 |
| Tjocklek rör, över/under i mm Ø | 20/17 | 20/17 |
| Öppning överarmsdel i cm | 7 | 7 |
| Vikt per produkt, kg | 0,45 | 0,40 |
| Max brukarvikt / produkt, kg | 100 | |
| Färg rör | Ofärgat | Ofärgat |
| Diameter doppsko i mm | 16 | |
| Art nr doppsko, reservdel | 716 + färgkod | |
| Material, plastdelar | Polyamid (PA16) | |
| Material, rör | Aluminium | |
| Regelbunden rengöring | Milt rengöringsmedel och mjuk trasa | |
| Rengöring mellan brukare | Kan autoklaveras 85°C max 3 min. Eller desinfektionsmedel Incidin Liquid (reflexen ska ej torkas) | |
| Kasseras | Sorteras efter lokal anvisning | |
| Förvaring | Rumstemperatur | |
| Övriga information | Produkt innehåller inte PVC | |



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg

Kryckan bör kasseras 3 år efter tillverkning (datum se etikett på rör). Kryckan skall även tas ur bruk om den är defekt, har synliga skador, utsliten eller glappar i höjdjusteringen vilket kan medföra risk vid användning



Reg.-Nr: MQ 0115318



Armbågskrycka klassiker Junior Art nr 241

OBS! Läs anvisningarna noga innan kryckan tas i bruk!

Avser 2012 års modell eller senare

Hur individanpassas kryckan?

Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika bra att använda inne som ute.

Hur man använder kryckor kan skilja sig från fall till fall och beror på individuella begränsningar vad det gäller gångförmågan, i början är det viktigt att kvalificerad personal ger dig råd och instruktioner om hur kryckan ska användas.

Hur kryckan används är beroende på individuella behov och gångförmåga, utprovning/justering skall ske i samråd med kunnig personal som har kunskap om produkten och dess funktion i olika situationer för bästa möjliga resultat.

För rätt användning av kryckan skall längden justeras till individuell längd. Justeringen skall ske av kvalificerad personal. Felaktigt justerad krycka kan begränsa den funktionella förmågan. Kryckan kan bara ge önskad hjälp om de anpassas optimalt efter din längd. Om du är osäker ta kontakt med specialist.

Justering av höjd: Tryck in knappen som fixerar de båda rören, dra därefter isär eller skjut ihop rören till önskad längd. Lås sedan rören genom att matcha de två bulvhålen och se till att tryckknappen snäpper på plats igen.

OBS! Kontrollera alltid att rören är fixerade genom att försöka rotera eller flytta rören!

På modellerna 241 kan underarmsdelen justeras med en tryckknapp till önskad längd mellan 19-24 cm.

Bruksanvisning


- Använd alltid stödet på motsatt sida av den skadade eller svaga.
- Håll kryckan nära kroppen och luta den inte utåt,
- Placera kryckan så rakt mot marken som möjligt. så att den inte glider iväg
- När du går skall kryckan placeras så upprätt som möjligt på marken.
- Sätt inte kryckan för långt bort från kroppen. Du riskerar då att ramla.
- När du sitter bör du använda stolar med armstöd så att när du ställer dig upp kan du använda armstödet som stöd.
- Om möjligt bör kvalificerad personal visa dig hur man går uppför trappor med kryckor
- När du går i en trappa med en krycka bör du hålla ledstången med den lediga handen.
- När du går i en trappa med två kryckor, ta kryckorna i en hand och använd ledstången som stöd.
- Håll kryckan i ett stadigt och omslutande grepp i handtaget.
- Välj en sko med låg och stadigt klack så att benet klarar den extra vikten bättre.
- Användning av kryckor kan ge tryck i händerna eller belastning på armar och axlar, var därför noga med att vila ofta.
- Tryckmärken eller skavsår kan uppstå på händer armar eller kläder och som förebyggande åtgärd rekommenderar vi att man använder polstring på handtag samt vaddering av armbygel.
- Ta om möjligt hjälp av en medföljande person som du kan luta dig mot och som kan ta emot dig om du ramlar.
- Om du ändå ramlar. Låt om möjligt kryckorna falla från kroppen så att du inte faller på dem!

Fortsättning på nästa sida



Varning!

Trappor utan ledstång utgör en ökad risk för fall och stor försiktighet bör iakttagas när du går i en sådan trappa!

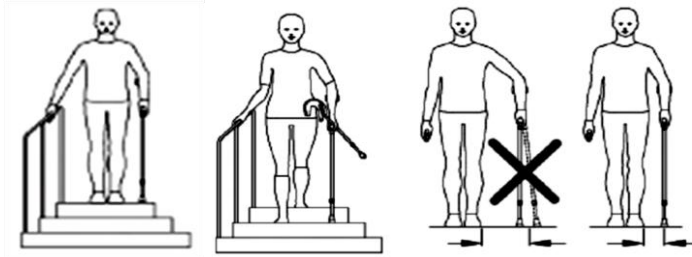

Säkerhetsföreskrift

Produkten skall enbart användas till avsedd användning och föreskrifter enligt nedan skall följas!

- Utprovning/justering skall ske i samråd med personal som har kunskap om produkten och dess funktion. Felaktigt justerad krycka begränsar användningsområdet samt kan leda till en ökad felbelastning och i värsta fall en säkerhetsrisk!
- Max brukarvikt får ej överskridas.
- Kryckan skall användas i original utförande för att garanti skall gälla samt original-Reservdelar/tillbehör.
- Handtaget får ej belastas med kassar el dyl.
- Kryckan får ej användas att lyfta med, trycka på knappar osv
- Regelbunden kontroll av kryckan om det finns yttre skador rådgör med en specialist. Sneda eller skadade kryckor får ej användas då de har en sämre stabilitet. Kryckan skall under dessa omständigheter ej lagas utan bytas ut!
- Regelbunden kontroll av doppskon, defekt skall bytas ut mot original tillbehör, Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.
- OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våt men även fuktiga underlag, löv, grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka!
- Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom kryckan kan glida iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning!
- Löst liggande mattor eller dyl. kan glida iväg och orsaka olyckor!
- Vid justering av höjden är det viktigt att tryckknappen är fixerad i de båda rörens hål och att tryckknappen är helt ute efter justering.
- Alla skruvfästen måste dras åt ordentligt innan användning.
- Undvik snö eller is om din krycka inte är utrustad med doppskor för vinterbruk.
- Vid vinterväglag finns separat isbrodd art nr 1719 (en pigg) och 1718 (hel krona) som tillbehör.



Vår original-doppsko är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet. Den har också ett skålat stålslag för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av kryckan.

OBS!! Då du behöver använda kryckor eftersom din vanliga rörlighet är nedsatt. Även om kryckorna hjälper dig i den här situationen bör du alltid tänka på att din grundläggande rörlighet fortfarande är nedsatt. Var alltid medveten om detta och var alltid försiktig när du använder kryckor.

Förvaring/Rekonditionering

- Förvara aldrig kryckan i närheten av värme t.ex. ugn, element eller i bilens bakruta.
- Undvik att lägga kryckan ute i solen längre stunder då plasten påverkas negativt.
- Undvik att tappa kryckan.
- Kontrollera regelbundet doppskons kvalitet för att öka användarsäkerheten.
- Under rätt förhållande kan kryckan förvaras upp till 3 år, kontrollera alltid kryckan innan den åter tas i bruk.
- Regelbunden rengöring av kryckan med ett mildt medel samt mjuk trasa. Rengöring mellan brukare rekommenderas i autoklav 85° max 3 minuter eller desinfektionsmedel Incidin Liquid.
- **Handtag samt doppsko får inte rengöras med oljiga ämnen pga halkrisk!**
- Regelbunden kontroll av kryckan skall göras och skadad eller trasig krycka skall kasseras.

Garanti

Garantitiden 2 år gäller under förutsättning att kryckan har använts på ett korrekt sätt och ändamål samt att leverantörens originaldelar har använts. Garantin omfattar ej förbrukningsdelar. Efter garantitiden ligger ansvaret för användandet av kryckan hos användaren.

Tillbehör

| Benämning | Isbrodd | |
|----------------------|--|---------|
| Utförande | Krona | En pigg |
| Sanicare art nr | 1718 | 1719 |
| Diameter på rör i mm | 17-23 | |
| Material | Metall | |
| Rengöring | Milt rengöringsmedel och en mjuk trasa | |



1718



1719

Bruksanvisning för isdubb monterad/tillbehör art 1718 samt 1719

Innan användning kontrollera att låsmekanismen fungerar

- Skruva ut de två skruvarna på var sin sida (Bild 1)
- Placera isbrodden på röret och kronan ner mot doppskon.
- Se till att kronan sluter tätt mot doppsko
- Skruva därefter i skruvarna så att de kommer på framsidan av kryckan/käppen (i gångriktning). Om diameter är större använd de längre medskickade skruvarna.
- När isbrodden inte skall användas, tryck då in de båda vita plastdetaljerna på var sin sida (bild 2).
- Därefter kan man enkelt fälla upp isbrodden om man inte längre har behov av den.
- Samma enkla tillväga gångsätt gäller när man fäller ner isbrodden

