



Doppsko med stålinlägg

OBS! Läs anvisningarna noga innan doppskon tas i bruk!

Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålinlägg för att minska risken att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka eller stödkäpp.

Monteringsanvisning: Välj en doppsko som har ca 1-2 mm mindre innerdiameter än vad kryckans nedre rör är i diameter. Detta för att doppskon skall fixeras säkert och inte ramla av vid användning. Demontera den slitna doppskon, gör rent röret och applicera den nya doppskon. Stöt kryckan lätt mot golvet för att fixera doppskon mot rörets nedre kant.

Sliten eller skadad doppsko skall bytas ut för att öka säkerheten vid användning.

Doppskon finns i flera färger: svart, blå, röd, grå, lila, gul

Sanicare art nr	716sw	716bl	716ro	716gr	716au	716gr	719sw	719gr
Färg	Svart	Blå	Röd	Grå	Lila	Gul	Svart	Grå
Storlek innerdiameter	16	16	16	16	16	16	19	19
Material	Rågummi							
Regelbunden rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa							
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning							
Förvaring	Rumstemperatur							
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC							

Säkerhetsföreskrift:

- Regelbunden kontroll av doppskon, defekt doppsko skall bytas ut mot original doppsko.
- Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.
- OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våta och fuktiga underlag; löv, grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka!
- Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom kryckan kan glida iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning!
- Artikel **716** Passar endast till kryckor/käppar som är **17mm i diameter Ø**
- Artikel **719** Passar endast till kryckor/käppar som är **20mm i diameter Ø**



Bildexempel på doppsko svart

