



## Doppsko med stålslägg

**OBS! Läs anvisningarna noga innan doppskon tas i bruk!**

Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålslägg för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka

**Monteringsanvisning:** Sliten eller skadad doppsko skall bytas ut för att öka säkerheten vid användning. Välj en doppsko som har ca 1-2 mm mindre innerdiameter än vad kryckans nedre rör är i diameter. Detta för att doppskon skall fixera säkert och inte ramla av vid användning

Demontera den slitna doppskon, gör rent röret och applicera den nya doppskon. Stöt kryckan lätt mot golvet för att fixera doppskon mot rörets nedre kant

### Teknisk specifikation:

Benämning	Doppsko 16mm
Sanicare art nr svart	716sw
Sanicare art nr blå	716bl
Sanicare art nr gul	716ge
Storlek innerdiameter, mm	16
Material	Naturgummi
Regelbunden rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa. Kan autoklaveras 85°C, max 3 min
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH  
Kanalstrasse 79  
DE-48432 Rheine  
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB  
Skreaavägen 15  
311 44 Falkenberg



**OBS! Passar endast till kryckor/käppar som är 17mm i diameter Ø.  
Risk för sämre grepp och för halka vid vått och fuktigt underlag så som löv, grus, fuktiga golv etc!**



Reg.-Nr.: MQ 0115318



## **Säkerhetsföreskrift:**

- Regelbunden kontroll av doppskon, defekt doppsko skall bytas ut mot original doppsko. Kontrollera att doppskon är fri från smuts för ett säkert grepp mot underlaget.
- OBS! Risk för sämre grepp och risk för halka vid våta och fuktiga underlag; löv, grus etc. Även fuktiga golv innebär risk för halka!
- Ojämnheter och hål i underlag är mycket farliga eftersom kryckan kan glida iväg eller sjunka. Var extra försiktig vid dålig belysning!
- Passar endast till kryckor/käppar som är 17mm i diameter Ø.

Vår original-doppsko är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet. Den har också ett skålat stålslag för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av kryckan.