



Doppsko med stålslag

Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålslag för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka



Monteringsanvisning: Sliten eller skadad doppsko skall bytas ut för att öka säkerheten vid användning. Välj en doppsko som har ca 1-2 mm mindre innerdiameter än vad kryckans nedre rör är i diameter. Detta för att doppskon skall fixera säkert och inte ramla av vid användning. Demontera den slitna doppskon, gör rent röret och applicera den nya doppskon. Stöt kryckan lätt mot golvet för att fixera doppskon mot rörets nedre kant.

Benämning	Doppsko 16mm
Sanicare art nr	716sw
Färg	Svart
Storlek innerdiameter, mm	16
Material	Naturgummi
Regelbunden rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa. Kan autoklaveras 85°C, max 3 min
Kasseras	Sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB
Skeavägen 15
311 44 Falkenberg



OBS! Passar endast till kryckor/käppar som är 17mm i diameter Ø.
Risk för sämre grepp och för halka vid vått och fuktigt underlag så som löv, grus, fuktiga golv etc!



Reg.-Nr.: MQ 0115318