

Bruksanvisning

MerrySock strumppådragare

Art.nr 145163

MerrySock strumppådragare är tillverkad i polyetenplast. Den levereras med långa bomullsband och två klädnypor för att hålla strumpan på plats. MerrySock rengöres bäst med tvål och vatten eller med ett mildt rengöringsmedel.



Se till att den glatta sidan av strumppådragaren är mot foten. Böj ihop produkten och dra strumpan upp över flänsarna. Fäst med klädnyporna. Stick in foten och dra försiktigt i banden.

CE