



Sanisoft Mini Kol - kort - för små analläckage

Sanisoft Mini Kol är ett unikt specialtiesydd för små anal-läckage med ett effektivt kolfilter.


Tester gjorda av Hjälpmedelsinstitutet visar att lukt elimineras i 3-5 timmar. Vi vet att detta ger våra brukar en högre livskvalitet och ett fortsatt socialt liv.



Sanisoft Mini Kol kort har använts av många i många år.

För användarinstruktioner se bruksanvisning

Varumärke	Sanisoft
Benämning	Sanisoft Mini Kol – kort
Sanicare art nr	3537
Antal produkter/förpackning, st	25
Antal produkter/transportförpackning, st	250
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml	83
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	28
Absorptionsmaterial	Termobunden massa, superabsorbenter
Ytskikt	Non-woven av polypropylen
Spärrskikt	Polyeten
Kolfilter	Kol och viskos
Klinisk / Sensorisk provning (lukt) utförd av HI	Ja
Vikt per produkt, g	6,7
Längd, cm	22,5
Bredd, cm	7
Färg på releaseremsa	Vit med ljuslila text
Förvaring	Rumstemperatur
Kassering	Brännbart avfall. Får ej spolas ner i toaletten
Övriga information	Produkten innehåller inte PVC, latex, parfym eller hudvårdande medel

 Vid sår eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle. Vid värmeutslag: Lufttorka och vådra huden. Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann utprovning av storlek är viktig för bästa funktion.



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



sanicare



Bruksanvisning / handhavande

Produkten fästs i en underbyxa eller en i fixeringsbyxa med hjälp av en klisterremsa.

Avlägsna försiktigt skyddsremsan och applicera skyddet enligt illustrationen.

Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.

